


rollz®

Rollz Fit

ES - Guía del módulo y de la aplicación

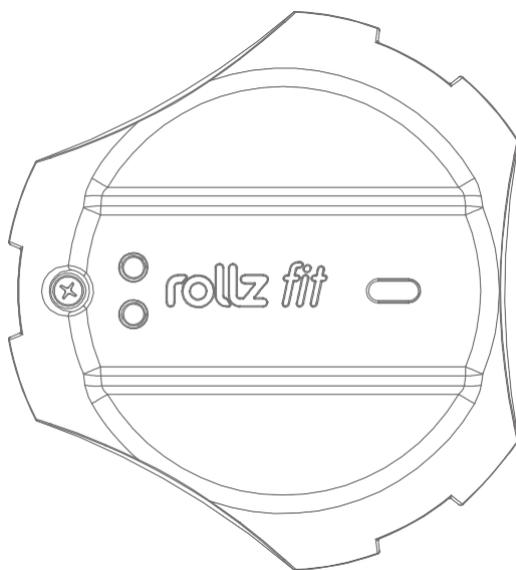

CE

ES - Guía del módulo y de la aplicación 1

Para manuales en otros idiomas, consulte
www.rollz.com.

GUÍA Y MÓDULO DE LA APP

rollz fit

ES


La última versión de este manual se encuentra disponible en nuestro sitio web y en la sección de configuración de la APP Rollz.

ANTES DE EMPEZAR


Este manual complementa el manual de usuario del Rollz Motion. Si aún no ha instalado el Rollz Fit, puede hacerlo siguiendo los siguientes pasos.

QUÉ CONTIENE LA CAJA

Para poder utilizar el Rollz Fit, necesitará lo siguiente:

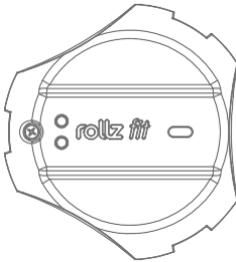

Rollz Fit

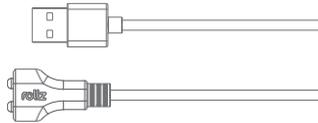

Cable de carga magnético

DATOS TÉCNICOS DEL MÓDULO

Temperatura de uso: -5 °C a +45 °C

Tensión y corriente nominales: 5 V CC - 0,5 A

Capacidad de la batería: 1200 mAh



ADVERTENCIA

Rollz Fit contiene componentes electrónicos. No sumerja el Rollz Fit en agua.

INTRODUCCION AL ROLLZ FIT

Bienvenido al manual del Rollz Fit, su compañero de entrenamiento virtual diseñado a medida para usuarios de andadores. El Rollz Fit es un complemento divertido y sencillo para el andador Rollz Motion que le ayuda a desarrollar o mantener hábitos saludables. El Rollz Fit está ahí para animarle a desarrollar un estilo de vida más activo y móvil.

Este sensor inteligente está integrado en la rueda del Rollz Motion y se puede utilizar para obtener información sobre su movilidad y actividad. El Rollz Fit le mantiene informado de las distancias que recorre cada día con el andador y mucho más.

Los resultados se pueden ver en la aplicación Rollz, donde también puede establecer objetivos y alcanzar logros. De esta manera, mantener o mejorar la movilidad y la actividad es fácil y divertido. Mantenga la motivación para mejorar su movilidad y alcanzar sus objetivos de movimiento.

¿Listo para empezar?



MANTÉNGASE ACTIVO CON LA APP ROLLZ

La App Rollz se puede descargar gratis en tu smartphone o tableta desde Play Store (para Android) o App Store (para iOS). Busca «Rollz».




Rollz



INSTALAR EL ROLLZ FIT

Si aún no ha instalado el Rollz Fit, siga los pasos que se indican a continuación. El Rollz Fit debe colocarse en el lado derecho del andador (cuando el usuario se encuentra detrás del andador). El Rollz Fit puede fijarse después de retirar la tapa original de la rueda.

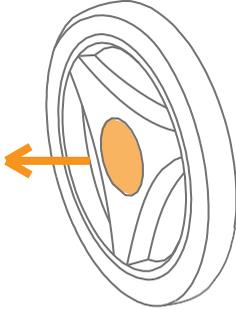


Desmontaje

La tapa de la rueda se puede desmontar con un destornillador plano:


- Utilice el destornillador plano para sacar la tapa de la rueda lo máximo posible.
- Una vez que la tapa esté lo suficientemente suelta, podrá retirarla.

Colocar

Coloque el Rollz Fit alineado con los radios y presione con fuerza para fijarlo a la rueda.

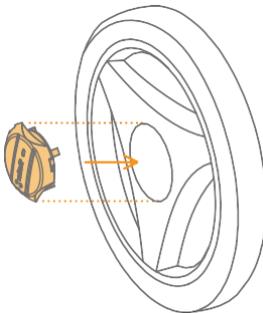

Asegúrese de que las pletinas del Rollz Fit coincidan con las ranuras en forma de U de la rueda.

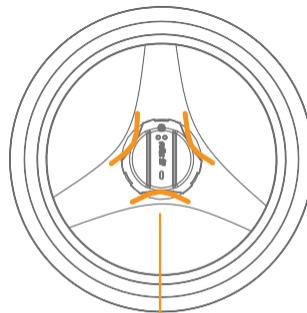

Asegúrese de que el Rollz Fit esté alineado con la forma de los radios.


CARGAR EL ROLLZ FIT

Antes de utilizar el Rollz Fit, asegúrese de que esté cargado.



ADVERTENCIA

Utilice únicamente el cable de carga magnético suministrado para cargar el módulo.

1. Para cargarlo, utilice el cable de carga magnético USB incluido. El cable tiene dos cabezales magnéticos que se acoplan de forma segura a su dispositivo, lo que facilita una recarga rápida.

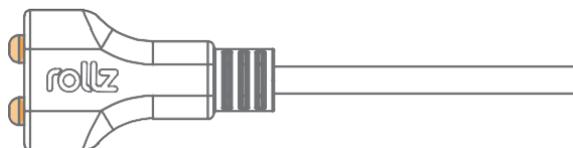

2. Conectar el cable de carga USB magnético al Rollz Fit.

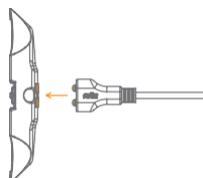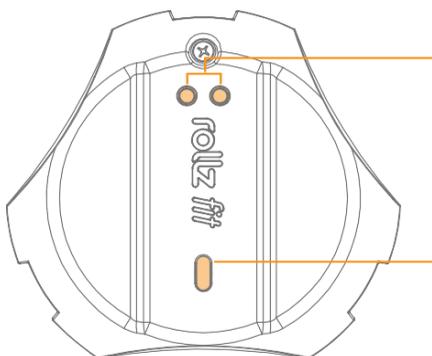

- Cargue el dispositivo únicamente con un adaptador de 5 V y 1 A.
- El dispositivo emite una luz roja durante la carga.
- La luz se vuelve verde cuando está completamente cargado.

La duración de la batería depende del uso. La batería se puede recargar en cualquier momento. Una batería completamente descargada tarda 4 horas en recargarse.

NOTA


Si la capacidad de la batería es inferior al 10 %, el Rollz Fit parpadeará brevemente cuando el andador se ponga en movimiento.



ENCENDER Y ACTIVAR EL ROLLZ FIT

Antes de encender el dispositivo, asegúrese de que Rollz Fit esté cargado.

Para encender Rollz Fit cuando está en modo de desactivado, simplemente gire la rueda moviendo el andador hacia adelante o hacia atrás. Esta acción activará automáticamente el dispositivo (lo que se indica con un destello de la luz azul). Cuando Rollz Fit está en funcionamiento, una luz azul parpadeará una vez cada 3 segundos.

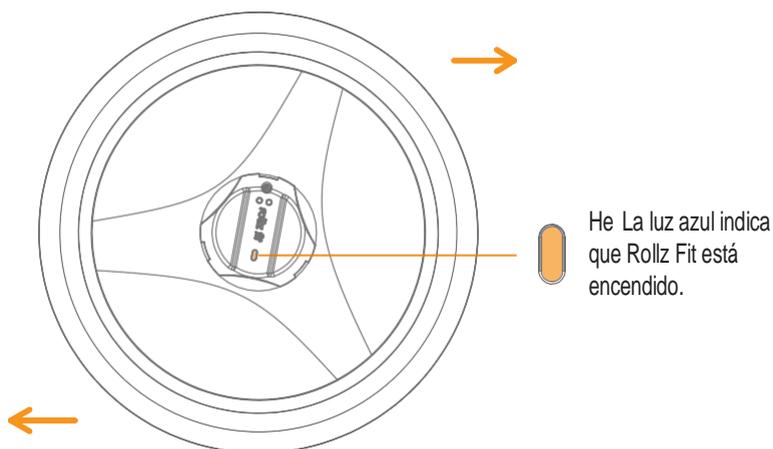


Si el Rollz Fit permanece inmóvil durante un tiempo, se activará automáticamente el modo SLEEP. Cuando vuelva a caminar con el Rollz Motion, el Rollz Fit se activará automáticamente de nuevo.

CONECTAR EL ROLLZ FIT

Encienda el dispositivo moviendo el andador y abra la aplicación Rollz para conectarse.

Al abrir la aplicación, hay que seguir unos pasos para conectarse al Rollz Fit. Estos pasos solo hay que seguirlos la primera vez. Después, se abrirá directamente la página de inicio de Rollz Fit y la aplicación buscará y se conectará al Rollz Fit automáticamente.

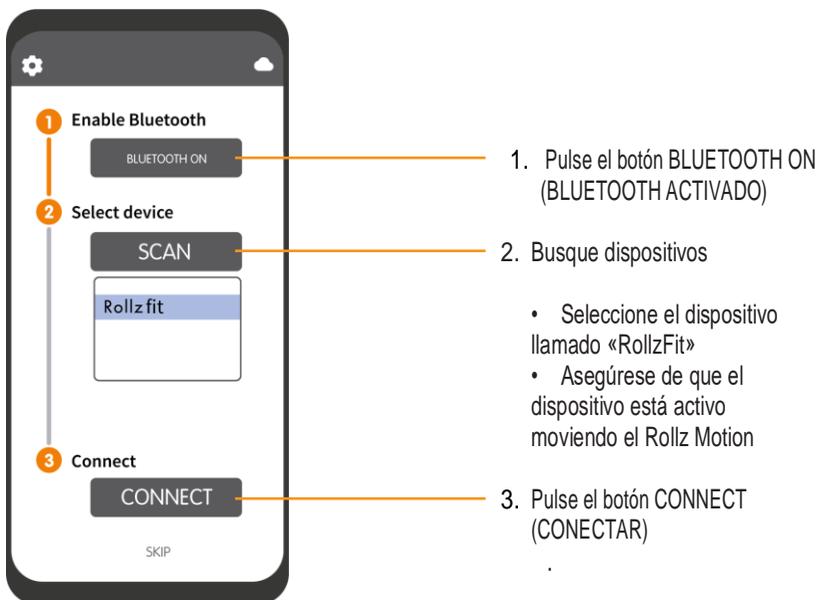

Cuando el dispositivo Rollz Fit se conecta correctamente, la aplicación Rollz muestra el símbolo de conexión  en la esquina superior derecha. Al mismo tiempo, el Rollz Fit también indica la conexión con una luz azul tenue.

En la configuración de la aplicación  puede configurar el perfil, el idioma preferido o encontrar nuestra información de contacto y nuestro sitio web.


NOTA

Rollz Fit solo necesita conectarse a la aplicación Rollz una vez. El dispositivo se conectará automáticamente a la aplicación cuando esté cerca. Asegúrese de que el dispositivo esté encendido moviendo el Rollz Motion.

USAR DEL ROLLZ FIT CON LA APLICACIÓN


En estas instrucciones se describen las funciones básicas; por lo tanto, algunos de los dibujos y la información pueden diferir de la realidad, ya que nos esforzamos continuamente por mejorar la experiencia del usuario.

La pantalla de inicio  muestra el objetivo de actividad diaria. Desplácese hacia abajo en la aplicación Rollz para ver sus estadísticas diarias.

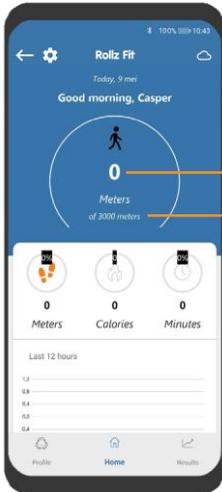

Medición del recorrido con Rollz Fit.
Objetivo establecido por el usuario.

Estadísticas diarias de distancia, calorías
y minutos.

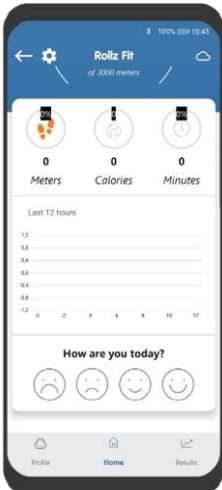

Datos gráficos del progreso diario

Valora tu forma física personal para
compararlo con los datos.

AJUSTAR LA CONFIGURACIÓN DE ROLLZ FIT

Gestiona la configuración de los ajustes iniciales en la página Perfil. 



Porcentaje de batería del Rollz Fit.


Sincronice los datos del Rollz Fit con su aplicación. Si hay una actualización disponible para el Rollz Fit, se mostrará aquí.

Información del usuario.

COMPROBAR LOS RESULTADOS

Comprueba el progreso general en Resultados .

El calendario muestra los días en los que has estado activo. Selecciona un día para ver las actividades. Cuando se establece un objetivo, las marcas de color indican los días en los que se ha cumplido el objetivo.

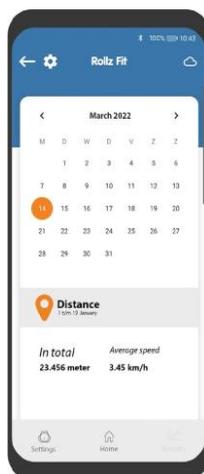

Resumen mensual.

Resultados por día seleccionado.

SEÑALES LED

El LED indica el funcionamiento del Rollz Fit.

| LED | Estado de funcionamiento |
|--|--|
| LED azul está apagado | Rollz Fit está en modo desactivado. |
| LED azul parpadea una vez cada 3 segundos. | Rollz Fit está encendido. |
| LED azul parpadea rápidamente al encenderlo. | La batería del Rollz Fit está por debajo del 10 % y necesita cargarse. |
| LED azul se está apagando. | Rollz Fit está conectado a la aplicación Rollz a través de Bluetooth. |
| LED rojo se apaga gradualmente. | Rollz Fit se está cargando |
| LED verde está encendido. | Rollz Fit está completamente cargado |

PROTECCIÓN DE DATOS

Rollz International trata su privacidad con cuidado. Al utilizar la aplicación Rollz, usted acepta que se recopilen algunos datos anónimos para mejorar la experiencia de la aplicación. Estos datos no se utilizarán con fines comerciales ni se compartirán con terceros.

GARANTÍA

El accesorio Rollz Fit está cubierto por los siguientes periodos de garantía:

1. Rollz Fit tiene una garantía de 24 meses.
2. La batería del dispositivo Rollz Fit tiene una garantía total de 12 meses.

CONSEJOS PARA EL USUARIO

Encontrará consejos para el uso óptimo de su Rollz Motion en www.rollz.com.

INFORMACIÓN SOBRE ELIMINACIÓN Y RECICLAJE DE ROLLZ FIT

El accesorio Rollz Fit no debe desecharse junto con los residuos domésticos. Deseche su Rollz Fit de acuerdo con las leyes y directrices medioambientales locales





Rollz® International BV

Rotterdamseweg 402M
2629HH Delft
The Netherlands

+31 (0)20 362 20 10

info@rollz.com

www.rollz.com

Version 2024.02



[rollzint](#)



[RollzInternational](#)



[rollzint](#)



[RollzInternationa](#)